


## Cellona®-polster Knipsjabloon voor vilt technieken

Over het algemeen worden twee diagonaal afgekorte lagen en een hele laag gebruikt. Bij bijzonder ernstige inversie/supinatie kunnen ook drie diagonaal afgekorte lagen nodig zijn.

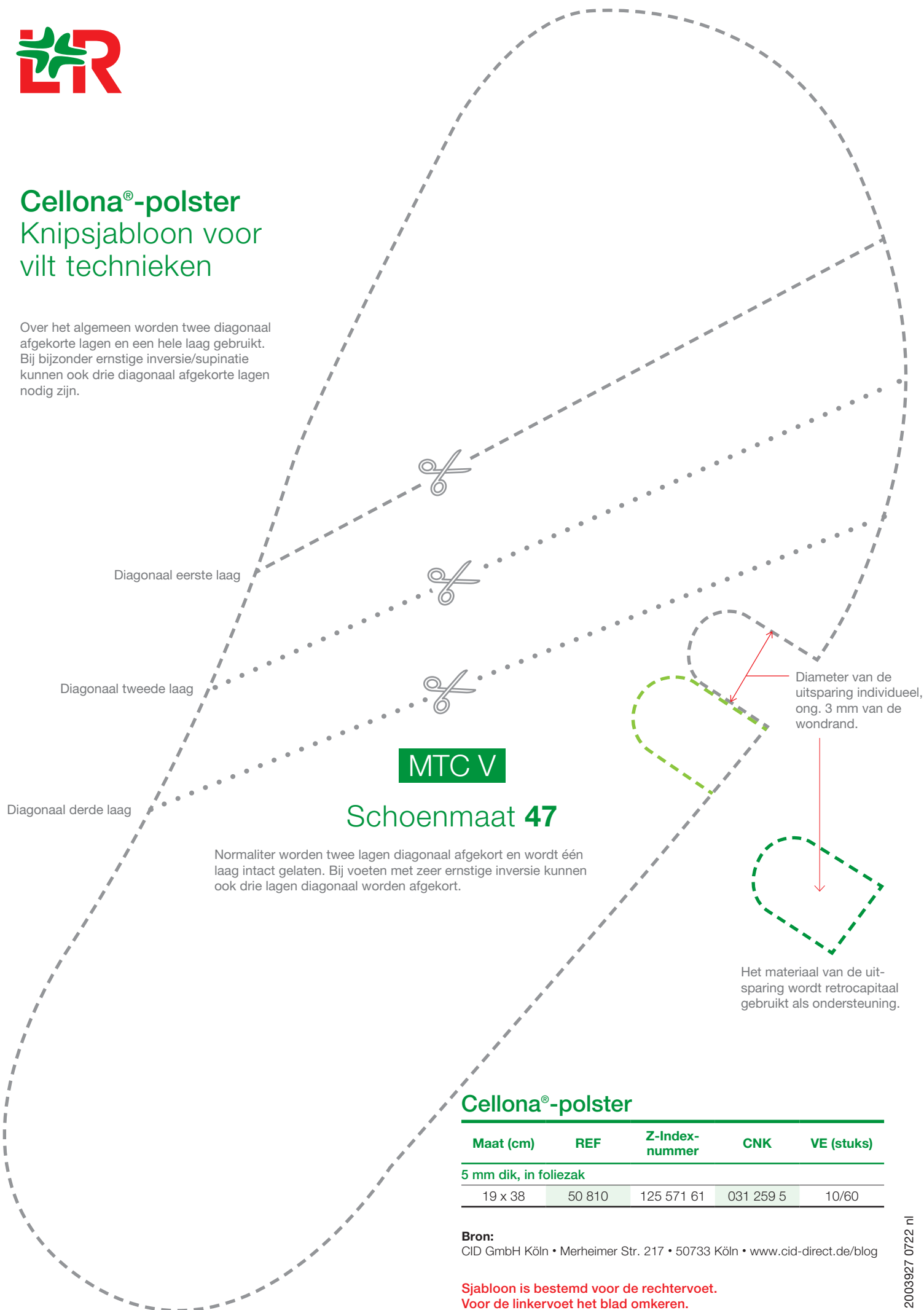

**MTC V**

**Schoenmaat 47**

Normaliter worden twee lagen diagonaal afgekort en wordt één laag intact gelaten. Bij voeten met zeer ernstige inversie kunnen ook drie lagen diagonaal worden afgekort.

Diameter van de uitsparing individueel, ong. 3 mm van de wondrand.

Het materiaal van de uitsparing wordt retrocapitaal gebruikt als ondersteuning.

### Cellona®-polster

Maat (cm)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
<b>5 mm dik, in foliezak</b>				
19 x 38	50 810	125 571 61	031 259 5	10/60

**Bron:**

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

**Sjabloon is bestemd voor de rechervoet.  
Voor de linkervoet het blad omkeren.**