

## Cellona® Rembourrage

### Patrons pour techniques du feutre

Le reste du matériel d'évidement sert d'appui rétro-capital et est posé en position proximale par rapport à l'évidement, de façon à ce que les bords soient superposés.

Diamètre de l'évidement individuel, à env. 3 mm de la berge de la plaie.

Point-cible du bord de l'évidement et de l'appui rétro-capital : proche mais sans dommage par rapport à la berge de la plaie : env. 3 mm.

OMT I

Pointure **37**

**3x**

### Cellona® Rembourrage

Taille (cm)	RÉF	CNK	CD (unité)
5 mm d'épaisseur, en sachet plastique			
19 x 38	50 810	031 259 5	10/60


**Source :**

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

**Le gabarit convient au pied droit.  
Pour le pied gauche, retourner la feuille.**


## Cellona® Rembourrage

### Patrons pour techniques du feutre

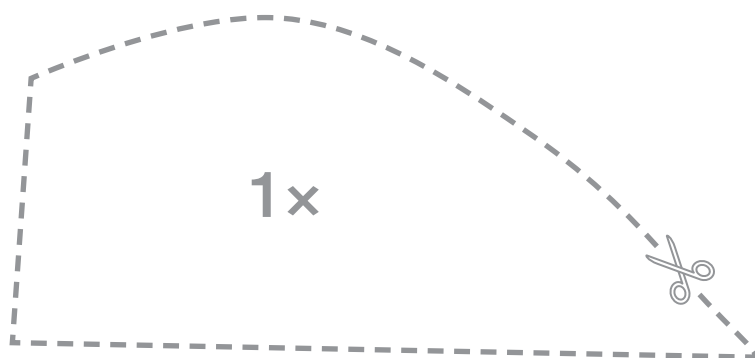

## OMT I

### Pointure 37

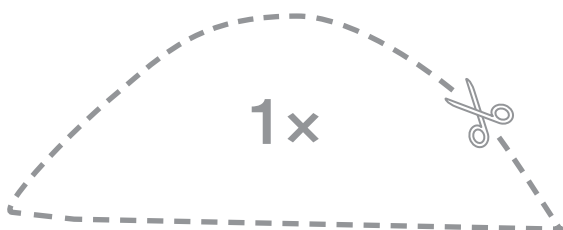

## Cellona® Rembourrage

Taille (cm)	RÉF	CNK	CD (unité)
5 mm d'épaisseur, en sachet plastique			
19 x 38	50 810	031 259 5	10/60

Source :  
CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

Le gabarit convient au pied droit.  
Pour le pied gauche, retourner la feuille.