

Cellona® Rembourrage

Patrons pour techniques du feutre

Deux couches raccourcies en diagonale et une couche complète sont généralement nécessaires. En cas d'inversion/supination particulièrement prononcée, trois couches raccourcies en diagonale peuvent être aussi nécessaires.

1e couche diagonale
2e couche diagonale
3e couche diagonale

OMT V

Pointure 43

Généralement, 2 couches sont raccourcies en diagonale et une couche est gardée intacte. 3 couches peuvent être aussi raccourcies en diagonale en cas de pieds très inversés.

Diamètre de l'évidement individuel, à env. 3 mm de la berge de la plaie.

La matière de l'évidement sert d'appui rétro-capital.

Cellona® Rembourrage

| Taille (cm) | RÉF | CNK | CD (unité) |
|---------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 5 mm d'épaisseur, en sachet plastique | | | |
| 19 x 38 | 50 810 | 031 259 5 | 10/60 |

Source :

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

**Le gabarit convient au pied droit.
Pour le pied gauche, retourner la feuille.**