


## Cellona® Rembourrage Patrons pour techniques du feutre

Deux couches raccourcies en diagonale et une couche complète sont généralement nécessaires. En cas d'inversion/supination particulièrement prononcée, trois couches raccourcies en diagonale peuvent être aussi nécessaires.

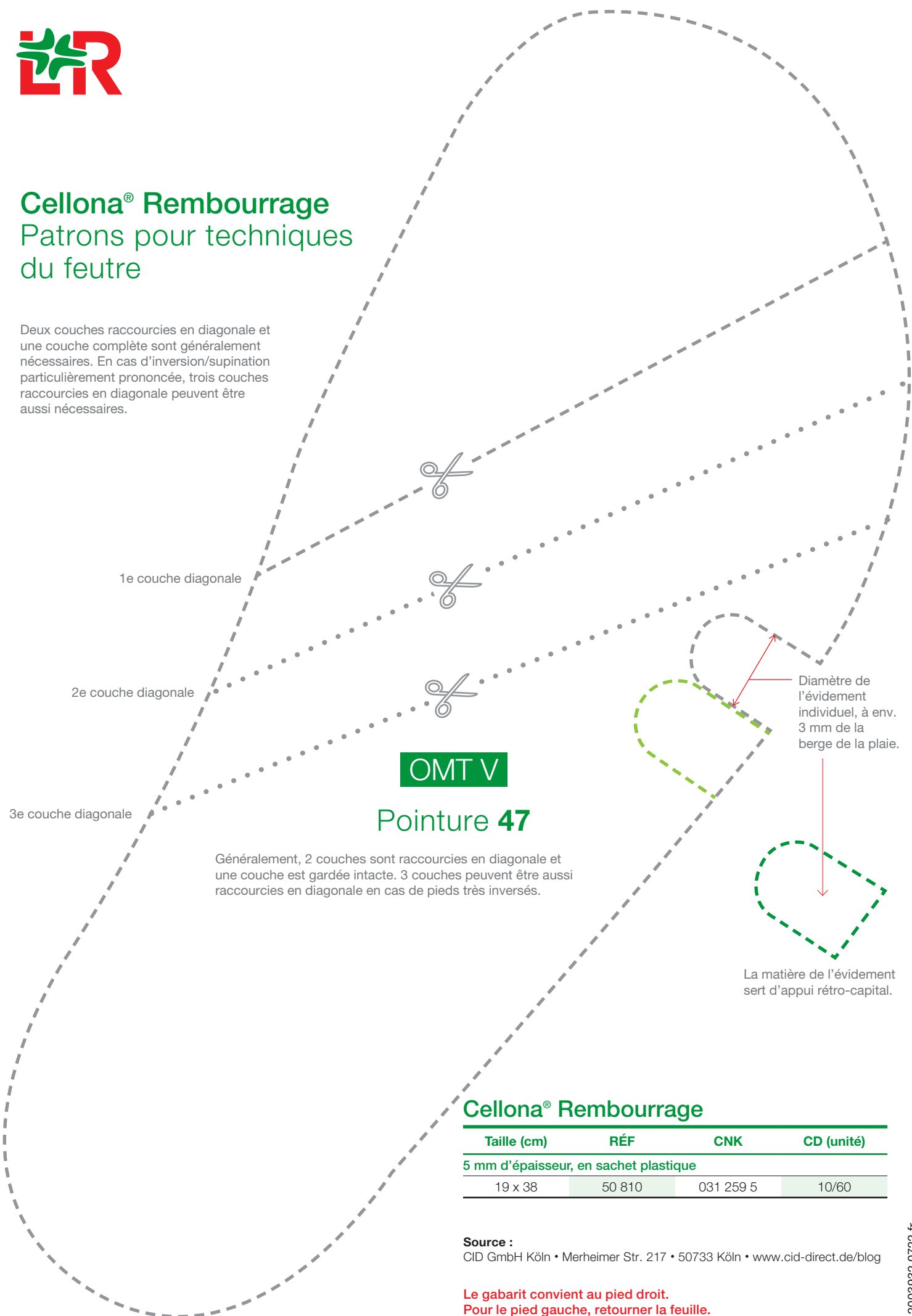

1e couche diagonale

2e couche diagonale

3e couche diagonale

**OMT V**

**Pointure 47**

Généralement, 2 couches sont raccourcies en diagonale et une couche est gardée intacte. 3 couches peuvent être aussi raccourcies en diagonale en cas de pieds très inversés.

Diamètre de l'évidement individuel, à env. 3 mm de la berge de la plaie.

La matière de l'évidement sert d'appui rétro-capital.

### Cellona® Rembourrage

Taille (cm)	RÉF	CNK	CD (unité)
5 mm d'épaisseur, en sachet plastique			
19 x 38	50 810	031 259 5	10/60

**Source :**

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

**Le gabarit convient au pied droit.  
Pour le pied gauche, retourner la feuille.**