

REFERENCE

Wondzorg van de diabetische voet

In het kader van de verzorging van een voetwonde bij een diabete patiënt neemt het debridement een uiterst belangrijke plaats in.

Niet enkel worden cel-, infectie- en weefseldebris uit de wonde verwijderd, ook de perilesionele hyperkeratose wordt dunner.

De wondgenezing wordt gestimuleerd door de wondranden bloot te leggen. Het is duidelijk dat deze behandeling als agressief kan overkomen. Het verplegende personeel blijft voorzichtig en werkt soms oppervlakkig bij het geven van de wondzorg.

Het debrideren gebeurt gewoonlijk met behulp van een curette of een scalpel. De zorg bestaat erin, droog of dood weefsel weg te snijden, de gevormde fibrine te excideren of weg te krabben en levenloos weefsel uit de wonde te snijden bij kwetsbare patiënten. Zelfs indien een dergelijke behandeling aangeraden wordt – daar de wondgenezing geactiveerd wordt door een correcte reiniging – is er voor de gespecialiseerde zorgverlener nog steeds het risico van een onverhoedse blessure, door een onverwachte beweging van de patiënt of een verkeerde inschatting van de zorgverlener.

Een ander alternatief is Debrisoft

Met Debrisoft kan het mechanische debridement dat door een arts werd uitgevoerd in alle zachtheid worden onderhouden. Het voordeel is dat wanneer het product regelmatig wordt gebruikt ook de frequentie zal afnemen van het mechanisch debridement met behulp van een scalpel bv.

Het product mag worden aangeraden voor oppervlakkige en voor diepe wonden.

Door middel van een 4 minuten durende behandeling wordt de wonde gereinigd en de genezing gestimuleerd. Het product kan met diverse wondspoelmiddelen worden gebruikt. Debrisoft bindt het wonddebris en houdt de wonde schoon. Bovendien heeft het een homogeen impact op de gehele wonde.

Zelfs indien de diabete patiënt lijdt aan sensibele polyneuropathie, waardoor deze gevoeliger wordt voor abrasie, zal de patiënt tijdens de uren na de behandeling met Debrisoft minder klagen over steken in de voet dan in het geval van een mechanisch debridement. Ook in het geval dat er geen overgevoeligheidsproblemen zijn – vooral dan in het geval de wonde van vasculaire aard is - verdraagt de patiënt het gebruik van Debrisoft beter dan een mechanisch debridement, dat bovendien niet altijd aangeraden wordt.

Met Debrisoft beschikken wij dus over een alternatief voor het mechanisch debridement. Dit product is eveneens doeltreffend en het wordt goed getolereerd bij andere wondsoorten, zoals veneuze ulcera die vaak zeer pijnlijk zijn tijdens de verzorging, traumatische wonden, ...

Dr. Marcelle Rorive

Dokter Marcelle Rorive is endocrinoloog, verantwoordelijke dokter voor de consultatie van diabetische voet in het CHU te Luik.

Debrisoft is een product Lohmann & Rauscher

Laboratoires Lohmann & Rauscher s.a.
Rue des Pontons 25
B-4032 Liège (Chênée)
Tel.: 04 367 97 11
Fax: 04 367 97 33
info@be.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.be