

REFERENCE

AZ SIJSELE / 1

Patiënt BJ

- Patiënt wordt naar ons verwezen door de huisarts omwille van een uitgebreide been necrose en geen positieve wondevolutie.
- Vrouw - °10/08/1926 - 85 j
- Progressief toenemende decubitus rechter onderbeen ontstaan augustus 2011.
- Negatieve duplex van de onderste ledematen
- Negatieve wondcultuur
- IDDM, corticodependent, hypertensie, anticotherapie
- Thuisbehandeling: povidonjood tulle en povidonjood gel.
- Eerste consult in AZ Alma op 15 september 2011.
- De antiseptische behandeling hebben we gestopt (er waren ook geen klinische tekens van infectie)
- De wonde werd grondig gedebrideerd en gereinigd met Debrisoft. De patiënte verdroeg dit zeer goed.
- Bij elk volgend consult werd de wonde goed gereinigd met Debrisoft.
- Wondherstel evolueert verder zeer gunstig (zie foto in bijlage) en is na 2,5 maanden bijna dicht.

Mr Erwin Van der Heggen

Verpleegkundig wondzorg specialist - AZ Sijsele

Mr Walter De Vleeschhouwer

Verpleegkundig wondzorg specialist - AZ Sijsele

Mr Marnix Tack

Verpleegkundig wondzorg specialist - AZ Sijsele



Debrisoft is een product Lohmann & Rauscher

Laboratoires Lohmann & Rauscher s.a.
Rue des Pontons 25
B-4032 Liège (Chênée)
Tel.: 04 367 97 11
Fax: 04 367 97 33
info@be.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.be